

aspira clip[®]

fresh

Erfrischt und befreit

In alltäglichen Situationen entstehen Momente der Erschöpfung, die häufig begleitet werden von mangelnder Konzentration, Müdigkeit oder Kopfschmerzen. So kann beispielsweise eine zu einseitige Sitzposition am Arbeitsplatz zu einer Daueranspannung des muskulären Halteapparates des Kopfes führen. Auch trockene oder verbrauchte Raumluft in Kombination mit einer zu flachen Atmung führen oftmals vorschnell zu Müdigkeitserscheinungen.

Die spezielle Zusammensetzung der natürlichen ätherischen Öle von aspiraclip[®] fresh, sorgt bereits vom ersten Atemzug an für schnelle Erfrischung und führt zu einer tiefen, bewussteren Atmung. Beginnende Anzeichen von Müdigkeit, Erschöpfung oder sich anbahnenden Kopfschmerzen können durch eine verbesserte Sauerstoffversorgung des Körpers auf diese Weise schnell gelindert und abgewendet werden.

Die Anwendung von aspiraclip[®] fresh sorgt für eine angenehme Befeuchtung der Nasenschleimhaut und ist insbesondere für Menschen, die sich längere Zeit in klimatisierten Räumen aufhalten, hilfreich. Auch bei Übelkeit oder schlechten Gerüchen, sorgt die erfrischende Duftkombination schnell und unkompliziert für Abhilfe.

Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält für Sie wichtige Informationen.



Um einen bestmöglichen Anwendungserfolg zu erzielen, muss aspiraclip[®] fresh vorschriftsmäßig eingesetzt werden

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Fragen Sie bitte Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3-5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine der aufgeführten Nebenwirkungen erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

MINI-INHALATOR

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist aspiraclip[®] fresh und wofür wird er angewendet?
2. Was ist vor der Anwendung von aspiraclip[®] fresh zu beachten?
3. Wie ist aspiraclip[®] fresh anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist aspiraclip[®] fresh aufzubewahren?
6. So pflegen Sie Ihren aspiraclip[®]
7. Weitere Informationen

1. WAS IST aspiraclip[®] fresh UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Der Mini-Inhalator aus hautfreundlichem Silikon enthält im Speicher drei ätherische Öle: Pfefferminz-, Zitronen- und Limettenöl.

aspiraclip[®] fresh wird symptomatisch angewendet:

- Bei Kopfschmerzen, Migräne und Übelkeit
- Bei Geruchsbelästigungen
- In Räumen mit trockener Luft
- Bei Konzentrationsstörungen und Antriebsschwäche

2. WAS IST VOR DER ANWENDUNG VON aspiraclip[®] fresh ZU BEACHTEN?

aspiraclip[®] fresh darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Pfefferminzöl oder einen der sonstigen Bestandteile sind.
- bei Asthma und anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen.
- in der Schwangerschaft und Stillzeit.
- bei Säuglingen und Kindern unter 6 Jahren.

Der Kontakt des Clips mit den Augen ist zu vermeiden.

3. WIE IST aspiraclip[®] fresh ANZUWENDEN?

Verwenden Sie aspiraclip[®] fresh immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Befreien Sie bei Bedarf Ihre Nase von Schleim und führen Sie den Mini-Inhalator wie auf der Abbildung in die Nasenöffnungen. Dabei atmen Sie ganz normal weiter.



Der Mini-Inhalator ist ein Einmalprodukt. Sie können seine Anwendung jedoch unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt mit weiteren Intervallen fortsetzen. Bewahren Sie den aspiraclip® zwischen den Anwendungen in der mitgelieferten Aufbewahrungsbox auf und halten Sie diese verschlossen. Der aspiraclip® dient Ihrem persönlichen Gebrauch und sollte nicht weitergegeben werden.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

- Reizungen der Nasen- und / oder Augenschleimhaut nach der Anwendung sind möglich. Die Häufigkeit ist nicht bekannt.
- Bei überempfindlichen Patienten wurde von Hustenreiz, Atemstillstand (Apnoe), Bronchial- und Kehlkopfkrampf berichtet. Die Häufigkeit ist nicht bekannt.
- Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wurden nicht untersucht. Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.
- Für die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Was ist beim Auftreten von Nebenwirkungen zu tun?

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, setzen Sie das Präparat zunächst ab und halten Sie gegebenenfalls Rücksprache mit einem Arzt. Sollten Sie allergische Reaktionen der Atemwege (Schwellungen im Gesicht, Mund- und/oder Rachenraum, akute Atemnot) bei sich beobachten, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte einem Arzt oder Apotheker mit.

5. WIE IST aspiraclip® fresh AUFZUBEWAHREN?

- Bewahren Sie den Mini-Inhalator in der mitgelieferten Box auf und halten Sie diese verschlossen.
- Nach Anbruch der Box sollten Sie den Mini-Inhalator nicht länger als 21 Tage verwenden.
- Das Verfallsdatum ist auf die Verpackung aufgedruckt. Es bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Verwenden Sie das Produkt in dieser Verpackung nicht mehr nach diesem Datum.
- Lichtgeschützt und nicht über 25°C lagern.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.


6. SO PFLEGEN SIE IHREN aspiraclip®

Nach der Anwendung sollten eventuell anhaftende Sekret-Spuren mit einem Tuch entfernt werden. Bei Bedarf kann auch ein Desinfektionstuch verwendet werden.

7. WEITERE INFORMATIONEN

Der Inhaltsstoff im Speicher / Docht von aspiraclip® fresh ist ein Gemisch aus Pfefferminz-, Zitronen- und Limettenöl.

Mit 2 x 0,045 ml ätherischem Öl getränkter Speicher / Docht in einem Silikonclip zur nasalen Anwendung.

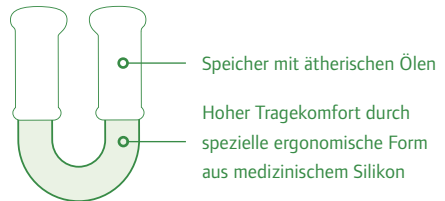

Darreichungsform und Packungsgröße 1 Packung mit 1 aspiraclip®



aspiraclip® ist patentiert und wird in Deutschland hergestellt.

Hersteller



AspiraClip GmbH
Mittelstrasse 7
D-12529 Berlin-Schönefeld
T: +49 (0) 30 2391 1070



Mindesthaltbarkeitsdatum

**Diese Gebrauchsanleitung wurde
zuletzt überarbeitet im Juni 2017.**